


Instructions pour le prélèvement d'échantillon cervical à l'aide de la brosse Rovers[®] Cervex-Brush[®] et du milieu de collecte de cellules pour PCR cobas[®]

Destiné à la détection du Virus du Papillome Humain (test cobas[®] VPH)

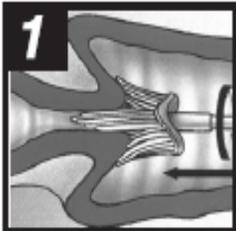

1. PRÉLÈVEMENT

- Porter des gants.
- Pour prélever l'échantillon, introduire les poils du milieu de la brosse dans le canal endocervical.
- Enfoncez assez profondément pour que les poils les plus courts soient en contact avec l'exocol.
- Pousser avec précaution et faire tourner la brosse cinq fois dans le sens des aiguilles d'une montre.



2. RINÇAGE

- Rincer la brosse dans le flacon du milieu de prélevement cellulaire cobas PCR, en la poussant dix fois au fond du flacon, en forçant les poils à se séparer.
- Tourner vigoureusement la brosse pour libérer ce qui reste de substance.
- Jeter la brosse de prélèvement.
- Ne pas laisser la tête de la brosse dans le flacon.



3. FERMETURE

- Serrer bien le bouchon de façon à ce que la ligne de pression de serrage du bouchon dépasse celle du flacon.
- L'échantillon est prêt pour le transport.

Transport : entre 2°C et 30°C • **Stabilité du prélèvement** : 6 mois

Précautions de manipulations:

Utiliser avec soin afin d'éviter les éclaboussures.